

# BONGIPS 쿨밴드

## 제품 용도설명서

구분	내용
제품명	본깁스 쿨밴드[BONGIPS COOLBAND]
품목명	압박용밴드
모델명	BON-IB001 / [규격: 10cm×3m]
신고번호	제신 21-1167호
보험여부	인정비급여 [코드: BK7100BV]
주성분	COTTON / SPANDEX
제조사	(주)지메딕스코리아 [G-MEDICS KOREA INC] 인천광역시 연수구 송도미래로 30, A동 408호 TEL 032-710-3961~2, FAX 032-710-3963
판매사	(주)지메딕스코리아[G-MEDICS KOREA INC]
제품용도	본 제품은 혈액이 고이는 것을 방지하거나 신체의 일부분을 탄력으로 압박 또는 잡아주는 기구. 보온 또는 흘러내림 방지와 찰과상 예방 및 충격완화 등의 목적으로 용하는 스포츠 용품은 제외한다.
사용방법 및 주의사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>사용방법</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제품에 이상이 있는지 확인한다.</li> <li>- 포장을 열고 제품을 꺼낸다.</li> <li>- 적절한 길이와 압력으로 사용할 부위에 밴드를 감는다.</li> <li>- 자착성 압박 밴드의 마지막 부분은 피부에 닿지 않게 감는다.</li> <li>- 자착성 압박 밴드를 감은 후 밴드의 끝 부분을 손바닥으로 몇 초간 눌러 고정 시켜준다.</li> </ul> </li> <li>• <b>사용 후의 보관 및 관리방법</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 본 제품은 일회용 의료기기이므로 재사용 하지 않는다.</li> </ul> </li> <li>• <b>사용시 주의사항</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.</li> <li>- 유통기한이 지난 제품은 사용하지 않는다.</li> <li>- 본 제품은 라텍스 고무 재질을 포함하는 제품으로 관련 알레르기가 있을 경우 주의해서 사용한다.</li> <li>- 본 제품은 정상 피부에만 사용해야 한다.</li> <li>- 본 제품은 환부의 보존, 보호, 처치의 목적으로 사용하지 않는다.</li> </ul> </li> </ul> <div data-bbox="1173 1393 1412 1617" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: right;">※ 본 제품은 「의료기기」임.</p>